

DEUTSCH

BE2022 Maxi Pro TV Streamer



Über den TV Streamer

Der Maxi Pro TV Streamer ermöglicht es Ihnen, den Fernseher auf eine für Sie geeignete Lautstärke einzustellen, ohne dass dabei die Lautstärke für andere im Raum anwesende Personen beeinflusst wird. Das Gerät übermittelt den Ton über Bluetooth in Stereoqualität an Ihren persönlichen Hörverstärker Maxi Pro (separat erhältlich).

Lieferumfang

Neben dem TV Streamer sind die folgenden Artikel enthalten:

Ein Mini-Stereokabel




Ein Mini-Stereo-zu-Cinch-Adapter




Ein optisches Kabel



Ein Hohlstecker-zu-USB-Kabel

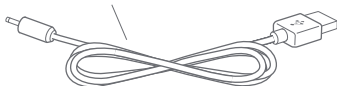


Ein Netzteil
(Ihr Stecker kann anders aussehen)

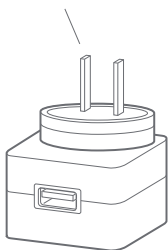

Die ersten Schritte

Um Ihren TV Streamer einzurichten, benötigen Sie außerdem:

Einen Fernseher mit Cinch-, Kopfhörer- oder optischem Audio-Anschluss

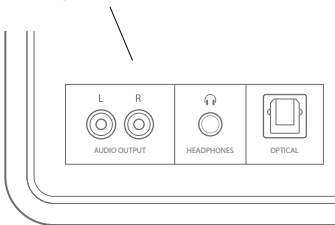

Den persönlichen Hörverstärker Maxi Pro



Den TV Streamer einrichten


Schritt 1: Audio-Anschluss

Sie können den TV Streamer auf unterschiedliche Weise an Ihrem Fernseher anschließen, abhängig davon, über welche Art von Audio-Anschluss Ihr Fernseher verfügt.

Verwendung des Cinch-Ausgangs am Fernseher

- 1 Schließen Sie ein Ende des Mini-Stereokabels am Audio-Eingang auf der Rückseite des TV Streamers an.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende mit dem Mini-Stereo-zu-Cinch-Adapter.
- 3 Schließen Sie die Cinch-Stecker am Audio-Ausgang Ihres Fernsehers an.

Hinweis: Sie können das Mini-Stereokabel auch direkt am Kopfhörer-Ausgang Ihres Fernsehers anschließen. Bitte beachten Sie, dass dadurch die Lautsprecher bei einigen Fernsehern auf stumm geschaltet werden.

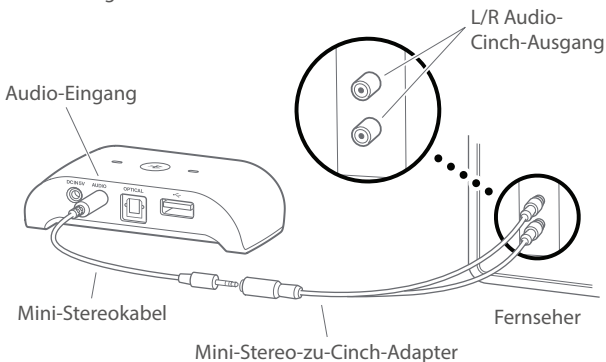


Verwendung des optischen Ausgangs am Fernseher

Wenn Ihr Fernseher über einen optischen Ausgang verfügt, können Sie das optische Kabel verwenden, um den TV Streamer an Ihren Fernseher anzuschließen. Dabei gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Schließen Sie das eine Ende des Kabels am optischen Eingang auf der Rückseite des TV Streamers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende am optischen Ausgang Ihres Fernsehers an.


Optisches Kabel

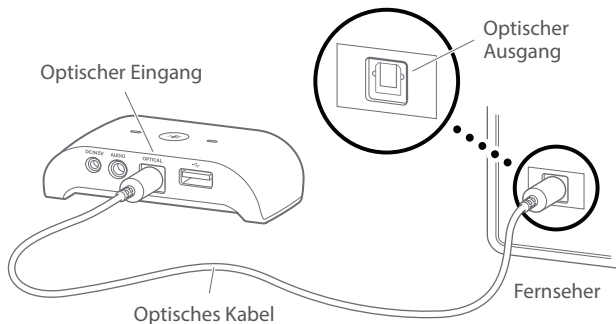

Schritt 2: Das Netzkabel anschließen

- 1 Schließen Sie den Hohlstecker am Netzeingang auf der Rückseite Ihres TV Streamers an.
- 2 Schließen Sie den USB-Stecker am Netzteil an.
- 3 Bringen Sie den Adapterstecker am Netzteil an und vergewissern Sie sich, dass er richtig eingerastet ist, bevor Sie ihn in die Steckdose stecken. Die Netzanzeige am TV Streamer leuchtet grün auf.

Hinweis: Sie können den USB-Stecker auch direkt am USB-Ausgang Ihres Fernsehers anschließen.

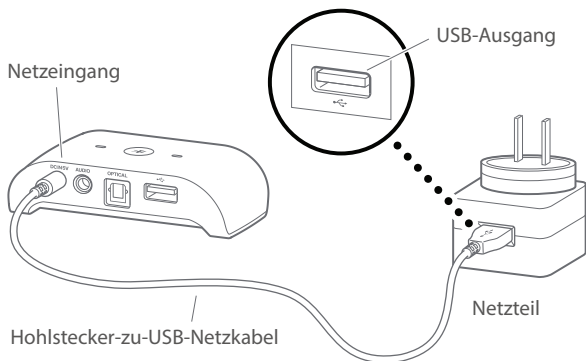

Schritt 3: Kopplungsvorgang

Hinweis: Wenn der TV Streamer zusammen mit Ihrem Maxi geliefert wurde, müssen Sie die beiden Einheiten nicht koppeln.

- 1 **Am TV Streamer:** Halten Sie die Bluetooth-Taste so lange gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige blau zu blinken beginnt.
- 2 **An Ihrem Maxi:** Drücken Sie die Mikrofon-Wahltaste. Halten Sie die Bluetooth-Wahltaste so lange gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige blau zu blinken beginnt.
- 3 Beide Bluetooth-Anzeigen leuchten dauerhaft blau, wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich war.

Verwendung Ihres TV Streamers

Einschalten


- 1 Der TV Streamer startet bei Anschluss an das Stromnetz automatisch. Die Netzanzeige leuchtet anschließend grün auf und signalisiert, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Beim Einschalten verbindet sich der TV Streamer automatisch mit Ihrem Maxi Pro. Beide Bluetooth-Anzeigen leuchten blau auf, sobald die Einheiten miteinander verbunden sind.

Hinweis: Bei bestehender Stromversorgung bleibt der TV Streamer eingeschaltet und stellt automatisch eine erneute Verbindung mit dem Maxi Pro her, sobald er sich wieder in Reichweite der Bluetooth-Verbindung befindet.

Ihr Maxi Pro laden

Sie können Ihr Maxi Pro am TV Streamer laden.

- 1 Schließen Sie das USB-Ende des Maxi Pro-Ladekabels am USB-Ladeausgang auf der Rückseite des TV-Senders an.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende mit der gelb gekennzeichneten Maxi Pro-Ladebuchse.
- 3 Die Maxi Pro-Akkuanzeige blinkt während des Ladevorgangs grün. Nach etwa 3 Stunden leuchtet die Anzeige dauerhaft grün und zeigt damit an, dass das Gerät vollständig geladen ist.

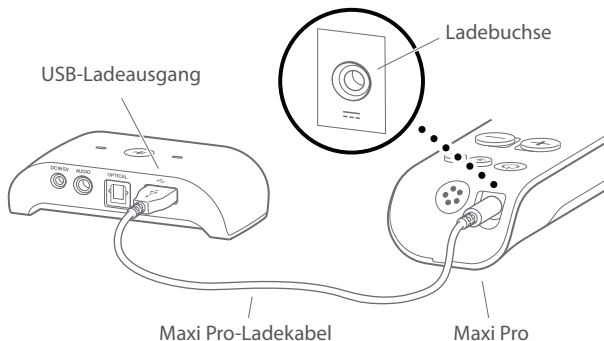

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Es passiert nichts, wenn ich die Bluetooth-Taste des TV Streamers drücke.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass der TV Streamer an das Stromnetz angeschlossen ist, siehe Abschnitt Das Netzkabel anschließen.
Ich höre den Ton des Fernsehers nicht in meinen Kopfhörern.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Maxi Pro in Reichweite befindet und dass er mit Ihrem TV Streamer gekoppelt ist, siehe Abschnitt Kopplungsvorgang.
Der Fernsehton verschwindet, sobald ich das Mini-Stereokabel am Kopfhörer-Ausgang anschließe.	<ul style="list-style-type: none">• Verwenden Sie stattdessen den Cinch- oder den optischen Ausgang an Ihrem Fernseher, siehe Abschnitt Audio-Anschluss.

Pflege und Wartung

Betreiben Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung, in der die Temperatur stets zwischen 0 und 35 °C beträgt.

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in die Öffnungen gelangt.

Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, kein Ammoniak und keine Scheuermittel.

Wenn das Produkt beschädigt zu sein scheint oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, befolgen Sie die Anweisungen in dieser Broschüre. Wenn das Produkt weiterhin nicht wie vorgesehen funktioniert, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung, um Service- und Garantieinformationen zu erhalten.

Bellman & Symfon Deutschland GmbH
Uelzener Str. 14
21335 Lüneburg
Telefon: 0800 74 333 38
Email: info@bellman.de

