

geemarc™ AMPLIDECT™ 595 U.L.E.

Hear the Difference

Deutsch



**BEDIENUNGSANLEITUNG
INHALTSVERZEICHNIS**

1.	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	1
2.	EINRICHTUNG DES TELEFONS	2
2.1	Inhalt der Verpackung	2
2.2	Standort	2
2.3	Schließen Sie die Basisstation an	3
2.4	Einrichtung und Aufladen des Mobilteilakkus	4
3.	LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN	5
3.1	Überblick über das Mobilteil	5
3.2	Überblick über die Basisstation	8
3.3	Mobilteil LCD-Anzeigebildzeichen und Symbole	10
3.4	Menüaufbau des Mobilteils	11
3.5	Eingabetabelle für Text und Ziffern	12
3.5.1	Deutscher Zeichensatz	12
4.	BENUTZEN SIE IHR TELEFON	13
4.1	Externe Anrufe tätigen	13
4.1.1	Wahlvorbereitung	13
4.1.2	Direktes Wählen	13
4.1.3	Anrufe unter Verwendung des Telefonbuchs	13
4.1.4	Anruf über die Anrufliste	13
4.1.5	Anruf über die Rückrufliste	14
4.1.6	Anruf-Timer	14
4.2	Anrufe annehmen	14
4.3	BOOSTER-Funktion	14
4.4	Anrufe beenden	15
4.5	Lautstärke des Hörers, bzw. des Lautsprechers einstellen	15
4.6	Anruf stumm schalten	15
4.7	Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen	16
4.7.1	Nummer von der Rückrufliste anrufen	16
4.7.2	Rückrufnummer im Telefonbuch speichern	16
4.7.3	Rückrufnummer löschen	16
4.7.4	Löschen der gesamten Rückrufliste	16
4.8	Das Mobilteil finden	17
4.9	Interne Anrufe tätigen	17
4.9.1	Intercom	17
4.9.2	Alle Mobilteile anrufen	18
4.9.3	Externe Anrufe weiterleiten	18
4.9.4	Eine dreiseitige Telefonkonferenz einrichten	18
5	TELEFONBUCH	19
5.1	Einen neuen Telefonbucheintrag hinzufügen	19
5.2	Nach einem Telefonbucheintrag suchen	19
5.3	Telefonbucheinträge einsehen	19
5.4	Telefonbucheinträge bearbeiten	20
5.5	Telefonbucheinträge löschen	20
5.6	Löschung des gesamten persönlichen Telefonbuchs	20
5.7	Überprüfen der Nutzung des Telefonbuchs	21
5.8	Kurzwahlnummern einrichten	21

5.8.1	Kurzwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten.....	21
5.8.2	Eine oder alle Kurzwahlnummern löschen.....	21
5.9	VIP Einstellung	22
5.9.1	Einstellung von VIP-Nummern	22
5.9.2	VIP-Liste einsehen	22
5.9.3	Eine oder alle VIP-Nummern löschen.....	22
5.9.4	VIP-Status.....	22
6	ANRUFANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG).....	23
6.1	Anruferliste einsehen.....	23
6.2	Weitere Informationen auf der Anruferliste	23
6.3	Eine Nummer von der Anruferliste im Telefonbuch speichern.....	23
6.4	Eine Nummer von der Anruferliste zur Black List hinzufügen.....	24
6.5	Einträge in der Anruferliste löschen	24
6.6	Löschen der gesamten Anruferliste	24
7	GESPERRTE NUMMER	24
7.1	Speichern oder bearbeiten Sie eine gesperrte Nummer	25
7.2	Informationen von einer gesperrten Nummer ansehen	25
7.3	Eine oder alle gesperrte Nummer löschen	25
7.4	Aktivierung der Funktion für gesperrte Nummern	26
7.5	Aktivierung der Funktion für private Nummern oder nicht verfügbar	26
8.	GROSSE FOTOTASTEN.....	27
9.	TELEFONEINSTELLUNGEN.....	27
9.1	Mobilteil-Einstellungen	27
9.1.1.	Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen.....	27
9.1.2.	Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen.....	27
9.1.3.	Die Klingeltonlautstärke einstellen	28
9.1.4.	Wartöne einrichten	28
9.1.5.	BOOST Tonverstärker Funktion aktivieren	28
9.1.6.	Mobilteil-Sprache einrichten	29
9.1.7.	Einstellung der Uhrzeit	29
9.1.7.1.	Datumsformat einstellen.....	29
9.1.7.2.	Zeitformat einstellen	29
9.1.7.3.	Datum & Uhrzeit einstellen	30
9.1.8.	Verbindung eines zusätzlichen Mobilteils	30
9.1.9.	Telefon zurücksetzen	30
9.2	Einstellung der Basisstation unter Verwendung des Mobilteils.....	31
9.2.1.	Klingelmelodie einstellen.....	31
9.2.2.	Klingellautstärke einstellen	31
9.2.3.	Flash-Time einstellen.....	31
9.2.4.	Den ersten Klingelton ausstellen	31
10.	SOS Notrufe	32
10.1	SOS Einstellungen.....	32
10.2	SOS Notrufe tätigen.....	32
10.3	SOS-Sprache wählen.....	32
10.4	SOS-Nachricht aufnehmen.....	33
10.5	SOS-Nachricht abspielen.....	33

10.6	SOS-Nachricht löschen.....	33
11.	WECKEREINSTELLUNGEN	34
11.1	Wecker aktivieren / deaktivieren.....	34
11.2	Alarm umbenennen.....	34
11.3	Einstellung der Weckermelodie.....	34
11.4	Sprachnachricht für den Wecker aufnehmen.....	35
11.5	Sprachnachricht für den Wecker abspielen.....	35
11.6	Löschen von Sprachnachrichten.....	35
12.	SPRECH-Funktion	35
13.	ANRUFBEANTWORTER.....	36
13.1	Anrufbeantworter an-/ausschalten.....	36
13.2	Nachrichten auf AB abspielen	36
13.3	Alle Nachrichten auf dem AB löschen	37
13.4	Memos auf den AB speichern	38
13.5	AB Einstellungen	38
13.5.1.	Eine AB-Ansage aufnehmen	39
13.5.2.	Abspielen der AB-Ansage (OGM)	39
13.5.3.	Persönliche AB-Ansage löschen.....	39
13.5.4.	Anzahl der Ringe vor dem abholen festlegen.....	39
13.5.5.	Aufnahmezeit der Nachrichten festlegen	40
13.5.6.	AB Sprache einstellen	40
13.5.7.	Filterung (mithören) an-/ ausschalten	40
13.5.8.	Fernzugriff aktivieren.....	41
13.5.8.1.	Den vierstelligen Fernzugriff-PIN ändern.....	41
13.5.8.2.	Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren.....	41
13.5.8.3.	Benachrichtigungsfunktion bei NACHRICHTEN.....	41
13.5.8.4.	Fernzugrif.....	42
14.	NEBENGERÄTE	43
14.1.	Einstellung der Nebengeräte	41
14.2.	Info Nebengerät	41
15.	FEHLERSUCHE	42
16.	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	47
17.	ANLEITUNGEN ZUR PFLEGE UND WARTUNG.....	48
18.	GARANTIE.....	49
19.	ERKLÄRUNGEN	49

Da eventuell wichtige Updates und Veränderungen, die Ihnen bekannt sein sollten, vorgenommen werden können, bitte gehen Sie auf unsere Webseite: www.geemarc.com, um eine aktualisierte Bedienungsanleitung zu erhalten

ACHTUNG: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elterninheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Schneiden oder die Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C).

Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.



Informationen zum Netzteil: Ausgang: 6V DC 0,6A, 3,6W. Ten Pao. Modell: S005BNV0600060 (EU), S005BNB0600060 (UK)



Wiederaufladbarer Akku: Modell: KH-AAAJ600-D x 3 Stück.
1,2V, 600mAh. Corun.

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung Ihres Telefongerätes müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzung zu verringern, einschließlich folgender:

1. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen.
2. Befolgen Sie alle auf dem Produkt angeführten Warnhinweise und Anweisungen.
3. Ziehen Sie das Produkt vor dem Reinigen von der Steckdose ab. Keine flüssigen oder gesprühten Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung ein feuchtes Tuch verwenden.
4. Das Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden (beispielsweise in der Nähe von Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbecken).
5. Das Telefon keinem direkten Sonnenlicht oder extrem kalten Umweltbedingungen aussetzen. Das Telefon nicht in der Nähe von Heizquellen stellen, wie Radiator, Herd, usw.
6. Stromanschlüsse und Verlängerungskabel wegen Feuer- und Stromschlaggefahr nicht überlasten.
7. Ziehen Sie das Produkt in folgenden Fällen vom Wandstecker ab und wenden Sie sich zur Wartung an den Vertriebspartner:
 - Wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt oder verschlissen sind.
 - Wenn das Produkt bei Beachtung der Betriebsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - Wenn das Produkt heruntergefallen ist und das Gehäuse beschädigt wurde.
 - Wenn das Produkt eine wesentliche Veränderung in seiner Leistung aufweist.
8. Vermeiden Sie die Benutzung eines Telefons (mit Ausnahme von kabellosen Geräten) während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzeinschlag.
9. Benutzen Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, wenn sie sich in der Nähe des Gaslecks befinden.
10. Ausschließlich das mitgelieferte NiMh (Nickel-Metallhydrid) Akkupack verwenden! Die Betriebszeiten des Handapparats gelten nur für die Standard Akkupackkapazität.
11. Die Verwendung anderer Batterietypen oder nicht wiederaufladbarer Batterien/Einwegbatterien kann gefährlich sein. Sie könnte Interferenzen verursachen oder das Gerät beschädigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge einer solchen Nichteinhaltung.
12. Keine Ladestationen von Drittherstellern verwenden. Das Akkupack könnte beschädigt werden.
13. Das Akkupack darf keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie beispielsweise hellem Sonnenlicht oder Feuer und es darf nicht in Wasser getaucht werden.
14. Bei Geräten mit Stromanschluss sollte die Wandsteckdose (Netzteil) in der Nähe des Gerätes und leicht zugänglich montiert werden.

Entsorgungshinweis



1. Wenn ein Produkt mit diesem durchkreuzten Abfalleimersymbol versehen ist, so bedeutet dies, dass das Produkt von der europäischen Richtlinie 2012/19/EU abgedeckt ist.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte/Akkus müssen getrennt vom städtischen Abfallstrom über von Regierungs- oder örtlichen Behörden beauftragte speziell vorgesehene Sammeleinrichtungen entsorgt werden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer alten Geräte / Batterien hilft bei der Verhinderung negativer Folgen für Umwelt und menschliche Gesundheit zu verhindern.

Ausführliche Informationen zur Entsorgen Ihrer alten Geräte/Batterien erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, Abfallentsorgung, oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

2. EINRICHTUNG DES TELEFONS

2.1 Inhalt der Verpackung

Das Paket enthält die folgenden Artikel:

- 1 Basisstation
- 1 Kabelloses Mobilteil
- 1 Netzteil
- 3 NiMH wiederaufladbarer Akkupack
- 1 Netzkabel
- 1 Benutzerhandbuch

2.2 Standort

Hier sind einige Richtlinien, die Sie bei der Platzierung der Basisstation beachten sollten, um maximale Abdeckung und verringerte Interferenzen zu erreichen.

- Platzieren Sie sie im Innenraum an einem bequemen, hoch gelegenen zentralen Ort ohne Hindernisse zwischen Mobilteil und Basisstation.
- Platzieren Sie sie fern von elektronischen Geräten wie Fernsehgerät, Mikrowelle, Radio, Personal Computer, Funkgeräte oder anderen kabellosen Telefonapparaten.
- Vermeiden Sie die Ausrichtung nach Radiofrequenzsender wie die externen Antennen von Mobiltelefonstationen.
- Vermeiden Sie die Gefahr von Interferenz, indem Sie das Gerät nicht an einen Stromkreis anschließen, an dem bereits andere elektrischen Haushaltsgeräte angeschlossen sind. Versuchen Sie, das Gerät oder die Basisstation an einer anderen Steckdose anzuschließen.

Ist der Empfang am Standort der Basisstation nicht zufriedenstellend, positionieren Sie sie an einer anderen Stelle.


Je nach Umgebungsbedingungen sowie räumlicher und struktureller Faktoren, könnte die Reichweite reduziert sein. Die Reichweite ist in Innenräumen in der Regel geringer als im Freien.

2.3 Schließen Sie die Basisstation an

Stecken Sie das große Ende des größeren Netzteils in eine Wandsteckdose, die nicht von einem Wandschalter gesteuert wird **(D)**

Führen Sie die Kabel durch die Schlitze.

Stecken Sie das kleine Ende des größeren Netzteils in die Strombuchse an der Rückseite der Basisstation **(C)**

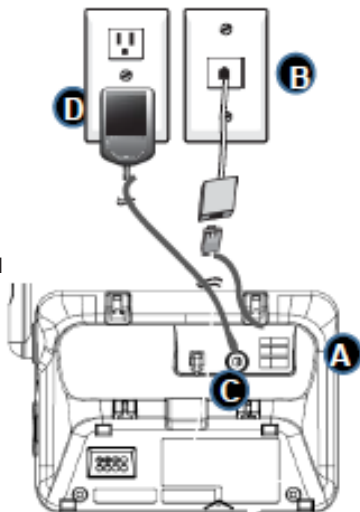

Schließen Sie das eine Ende des Telefonkabels in eine Telefonbuchse oder einen DSL-Filter. **(B)**

Ein DSL-Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, wenn Sie über DSL Hochgeschwindigkeits-Internet verfügen. Der DSL-Filter muss in den Telefonwandanschluss eingesteckt werden.

Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die **TEL. LINE**-Klinke an der Rückseite der Basisstation ein. **(A)**

HINWEIS:


Ausschließlich das mit der Basisstation mitgelieferte Netzteil verwenden.

wird gemäß dem Standard EN62368-1 als TNV-3 eingestuft.

Klassifizierte „gefährliche Spannung“ gemäß der Norm EN62368-1.

2.4 Einrichtung und Aufladen des Mobilteilakkus

1. Schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten.
Setzen Sie die 3 Batterien wie angezeigt ein, so dass die Polarität übereinstimmt (+,-).

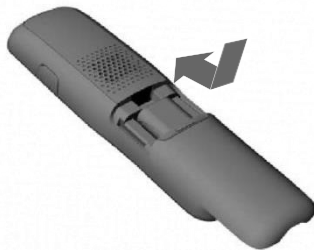


2. Legen Sie die Batterieabdeckung flach über den Batterieraum und schieben Sie diese nach oben, bis Sie fest sitzt.
3. Laden Sie das Mobilteil auf, indem Sie es mit der Vorderseite nach oben auf die Basisstation legen. Sobald das Mobilteil in der Ladestation aufgeladen wird, hören Sie einen Ton.
4. Laden Sie die Batterien mindestens 12 Stunden lang auf, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufladen.

HINWEISE

- Bitte verwenden Sie nur die mitgelieferten wieder aufladbaren NiMH-Batterien.
- Wenn Sie das Mobilteil für längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterie heraus, um ein mögliches Auslaufen zu verhindern.

3. LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

3.1 Überblick über den Handapparat

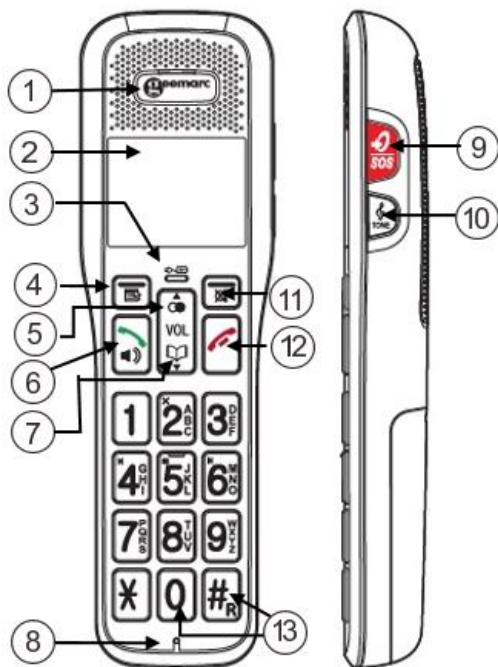

1. HÖRMUSCHEL

2. LCD DISPLAY

3. LADELEUCHTE ()

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

4. MENÜ/OK TASTE ()

Im Ruhemodus: Drücken, um zum Hauptmenü zu gelangen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Anrufs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch/ Wiederwahlliste/ oder Anrufliste zuzugreifen.

5. HOCH/ANRUFLISTE ()

Im Standby-modus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach oben zu springen.

In dem Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu springen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

6. SPRECHMODUS AN () LAUTSPRECHER ()

Im Standby-modus / vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Hörermodus zu tätigen.

In dem Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Hörermodus anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Hörermodus zu beantworten.

7. NACH UNTEN/TELEFONBUCH ()

Im Standby-Modus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach unten zu springen.

In dem Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu springen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

8. MIKROFON

9. LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG SOS ()/SOS)

Während eines Anrufs: Drücken, um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren / deaktivieren.

Im Standby-Modus: 3 Sekunden gedrückt halten, um die Notrufsequenz auszulösen.

Im Anrufmodus: 2 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf zu beenden.

10. TONTASTE

Während eines Anrufs: Drücken Sie diese Taste, um die hohen oder niedrigen Frequenzen lauter zu stellen (tief, normal, oder hoch).

11. INTERCOM / STUMM / LÖSCHEN ()

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Standby-Modus zurückzukehren.

Im Untermenü-Modus : Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen : Drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen : Drücken und halten, um alle Zeichen / Ziffern zu löschen.

Während eines Gesprächs : Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen / wieder zu aktivieren.

Während des Klingelns : Drücken, um den Klingelton des Mobilteils stumm zu schalten.

Im Standby-Modus : Drücken, um mit einem anderen Mobilteil zu kommunizieren.

12. AUFLEGEN ()

Während eines Anrufs Drücken, um ein Gespräch zu beenden

und zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Im Menü / Bearbeitungsmodus: drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzugehen.

13. ALPHANUMERISCHE TASTATUR, STERNTASTE, 0, RAUTE TASTE #R


Vor dem Wählen / im Nummernbearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben / ~~X~~/# einzufügen.

#R Während eines Gesprächs: Gedrückt halten, um einen Rückruf zu tätigen.

Während eines Anrufs: Drücken, um einen neuen Anruf zu erhalten, wenn Sie sich für den Anrufwarteservice Ihres Dienstleisters eingeschrieben haben.

0 Taste im Ruhemodus/ vor dem Anruf/ Nummernbearbeitungsmodus: Gedrückt halten um eine Pause hinzuzufügen.

3.2 Überblick über die Basistation

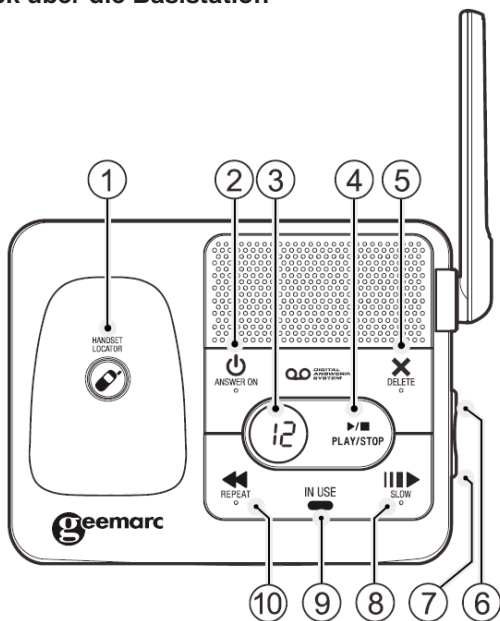

1. / ORTUNG DES MOBILTEILS

Wenn das Telefon nicht benutzt wird, können Sie diesen Knopf drücken, um alle Mobilteile anzuwählen. Dient auch, um ein zusätzliches Mobilteil anzumelden.

2. / ANRUFBEANTWORTER AN

Drücken, um den integrierten Anrufbeantworter an- oder auszuschalten.

Blinkt, wenn Sie eine neue Nachricht haben.

3. NACHRICHTENZÄHLER

Zeigt die Anzahl der Nachrichten an

4. / ABSPIELEN/STOPP

Drücken, um das Abspielen der Nachrichten zu starten oder zu stoppen.

5. / LÖSCHEN

Drücken, um eine Nachricht während des Abspielens zu löschen.

Drücken Sie lang, um alle alten Nachrichten zu löschen, wenn das Telefon nicht benutzt wird.

6. VOLUME + (▲)

Während des Abspielens von Nachrichten drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.
Im Bereitschaftsmodus drücken, um die Klingellautstärke der Basisstation zu erhöhen.

7. VOLUME - (▼)

Während des Abspielens von Nachrichten drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.
Im Bereitschaftsmodus drücken, um die Klingellautstärke der Basisstation zu verringern.

8. |||▶ /SLOW

Während des Abspielens einer Nachricht, drücken Sie auf diese Taste, um die Abspielgeschwindigkeit zu verlangsamen.

9. IN USE (WIRD VERWENDET)

AN, wenn die Leitung besetzt ist, oder wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf beantwortet.

BLINKT bei der Anmeldung eines neuen Mobilteils, oder bei einem eingehenden Anruf.

10. ◀◀ / WIEDERHOLEN


Drücken, um eine Nachricht zu wiederholen.




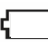




Zwei Mal drücken, um die vorhergehende Nachricht abzuspielen.

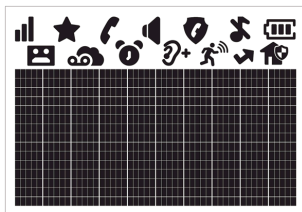Im Ruhemodus: drücken Sie auf die Taste, um ein Memo aufzunehmen.

3.3 Mobilteil LCD-Anzeigebildzeichen und Symbole

Die Bildschirmanzeige liefert Ihnen Informationen über den derzeitigen Status Ihres Telefons.




	Zeigt die derzeitige Signalstärke an. Je mehr Säulen, desto grösser die Signalstärke. Wenn das Mobilteil zu weit von der Basis entfernt ist, verschwindet das Symbol auf dem LCD
	An, während eines Anrufes. Blinkt bei eingehendem Anruf.
	An, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.
	An, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist. Blinkt, wenn die Batterie aufgeladen wird.
	Piept und blinkt, wenn die Batterie niedrig ist, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen werden muss.
	An, wenn der Anrufbeantworter (AB) eingeschaltet ist. Blinkt, wenn eine neue Nachricht vom AB empfangen wurde.
	An, wenn der Wecker eingestellt ist. Blinkt, wenn der Wecker klingelt.
	An, wenn eine neue Sprachnachricht (VMWI) empfangen aber noch nicht abgehört wurde. Verschwindet, wenn alle Sprachnachrichten abgehört wurden.
	An, wenn das Blockier- bzw. ohne Nummer Modus aktiviert ist. Wird auf der Anrufliste beim blockierten Anruf angezeigt.
	An, wenn der Klingelton ausgeschaltet ist.
	An, wenn eine neue Anrufliste (auf dem Anruflistenball) erstellt wurde.
	An, wenn die BOOST-Funktion aktiviert ist

3.4 Menüaufbau des Mobilteils

Benutzen Sie die **OBEN LINKE MENÜ TASTE** , um das Menü zu öffnen.

Benutzen Sie auch diese Taste zur Bestätigung.

Benutzen Sie **▲▼**, um zu navigieren.

Benutzen die **OBEN RECHTE TASTE** , um eine Aktion abzubrechen, zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen oder das Menü zu verlassen.

Beziehen Sie sich auch die folgende Menüstruktur:

ANRUFLISTE	FOTOTASTE	TEL.-BUCH	BLOCK ANR.	INTERCOM	BS EINST.
<i>Unter einem ausgewählten Eintrag:</i> INFOS TB HINZUF. SL HINZUF. FOTO HINZ LÖSCHEN ALLE LÖSCHEN	M1 M2 M3 M4 <i>Auf diesem Modell unverfügbare Funktion</i>	ALLE SCHNELLW. VIP <i>Unter einem Kontakt:</i> HINZU F. ANSEHEN ÄNDE RN LÖSCHEN ALLE LÖSCH VIP HINZUF FOTO HINZUF SW HINZUF. STATUS	SCHW LISTE <i>Unter einem Kontakt:</i> HINZUF. ANSEHEN ÄNDERN LÖSCHEN ALLE LÖSCHEN FOTO HINZ. STATUS EINSTELLEN BLOCK MOD OHNE NR.	MOBILTEIL BASIS ALLE	BS KLING KLGTON VOL BLINKZEIT 1.KLINGEL

MT EINST.	SOS EINST	WIEDERVORL	SPRACH WAHL	NEBENGERÄT	INFO NEBGER	ANRUFB.
KL. EINST. TON EINST. AUTO BOOST SPRACHE DATUM&ZEIT ANMELDEN STD.EINST.	SOS NUMMER SOS NACHR SOS SPRACHE	ALARM 1 ALARM 2 ALARM 3 ... BIS ALARM 10 AN/AUS <i>Falls AN können Sie Ihre Alarm einstellen:</i> EINMAL TÄGLICH MO-FR SA-SO	AN/ AUS	SIGNAL PRÜFEN DOORBELL	DOORBELL oder RINGER <i>Unter einem ausgewählten Eintrag:</i> STATUS WARNLIST UMBENEN	ABSPIELEN ALT LÖSCH. MEMO AB AN/AUS AB EINST. AB SPRACHE FILTERUNG AB ANSAGE. ANTW VERZ. AUFN. ZEIT AB FERNST. PIN ÄNDERN NACHR.KL.

3.5 Eingabetabelle für Text und Ziffern

Die folgenden Tabellen zeigen Ihnen, wo Sie Buchstaben und Satzzeichen finden können. Dies hilft Ihnen, wenn Sie einen Namen im Telefonbuch speichern oder die Bezeichnung Ihres Mobilteils ändern möchten.

Im Bearbeitungsmodus wird ein Cursor angezeigt, um die aktuelle Position der Texteingabe anzuzeigen. Er befindet sich rechts von dem zuletzt eingegebenen Buchstaben.

Tipps für das Schreiben:

1. Nachdem ein Zeichen gewählt wurde, springt der Cursor nach einer kurzen Pause an die nächste Position.
2. Sie können den Cursor innerhalb des Textes durch ▲ ▼ bewegen, um den eingegebenen Text zu bearbeiten.
3. Drücken Sie auf die **RECHTE DIALOGTASTE** (☒) auf dem Handapparat, um das letzte Zeichen zu löschen.
4. Drücken und halten Sie die RECHTE DIALOGTASTE (☒) auf dem Handapparat, um die gesamte Textkette zu löschen.

3.5.1 Deutscher Zeichensatz


Taste	Alphanumerisches Bearbeiten (Zur Eingabe von Namen in dem Telefonbuch oder Umbenennung des Handapparats)											Nummernwahl (Zur Eingabe von Telefonnummer, Datum / Uhrzeit)
	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	
Drücken	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	.	-	'	()	*	#	&	/	,	1
2	a	b	c	A	B	C	2					2
3	d	e	f	D	E	F	3					3
4	g	h	i	G	H	I	4					4
5	j	k	l	J	K	L	5					5
6	m	n	o	M	N	O	6					6
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7			7
8	t	u	v	T	U	V	8					8
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9			9
0		0										0, P (Pause)
*												*
#												#

4. BENUTZEN SIE IHR TELEFON

4.1 Externe Anrufe tätigen

4.1.1 Wahlvorbereitung

Unter Verwendung des Mobilteils:

Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf  um die Nummer zu wählen. Drücken Sie auf die **RECHTE TASTE**  um den Eintrag zu löschen.




4.1.2 Direktes Wählen

Unter Verwendung des Mobilteils:

Drücken Sie auf  um die Leitung freizuschalten und wählen Sie dann die Nummer.

4.1.3 Anrufe unter Verwendung des Telefonbuchs

Unter Verwendung des Mobilteils:





1. Drücken Sie auf , um auf das Telefonbuch zuzugreifen und drücken Sie auf , um den gewünschten Telefonbucheintrag zu wählen.
2. Drücken Sie auf  um den gewünschten Eintrag anzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher einzuschalten.

4.1.4 Anruf über die Anrufliste

Unter Verwendung des Mobilteils:




1. Drücken Sie auf , um auf die Anrufliste zuzugreifen.

ODER

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um auf die **ANRUFLISTE** zuzugreifen.
3. Drücken Sie  um den gewünschten Anruflisteneintrag auszuwählen.
4. Drücken Sie auf  um den gewünschten Anruflisteneintrag anzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher einzuschalten.

4.1.5 Anruf über die Rückrufliste

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie auf , um auf die Rückrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf , um die gewünschte Rückrufnummer auszuwählen.
3. Drücken Sie auf , um die gewählte Rückrufnummer anzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher einzuschalten.

4.1.6 Anruf-Timer

Ihr Mobilteil misst die Länge eines jeden Anrufs automatisch. Der Anruf-Timer wird einige Sekunden nach Beendigung des Anrufs angezeigt. Hierbei wird das Format Stunden, Minuten und Sekunden (HH:MM:SS) angezeigt.

4.2 Anrufe annehmen

Unter Verwendung des Mobilteils:

Wenn das Mobilteil sich nicht auf der Lade- oder Basisstation befindet:

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf  um den Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher einzuschalten.



Wenn das Mobilteil sich auf der Lade- oder Basisstation befindet: nehmen Sie das Mobilteil hoch, wenn es klingelt, um den Anruf anzunehmen.

4.3 BOOSTER-Funktion


Die BOOSTER-Funktion ermöglicht Ihnen, die Hörerlautstärke des Mobilteils zu erhöhen, um auf ein eingeschränktes Hörvermögen eingehen zu können.

Unter Verwendung des Mobilteils:

Um die BOOSTER-Funktion einzuschalten:

- Drücken Sie jederzeit während eines Anrufs auf  SOS. "BOOST AN" wird auf dem Bildschirm angezeigt, und die rote LED-Anzeige an der oberen Seite leuchtet auf.
- Sobald die BOOSTER-Funktion aktiviert ist, drücken Sie auf , um die Lautstärke im Hörer zu erhöhen oder zu senken.
- Die obere Anzeige auf dem Mobilteil ist an

Ausschalten der BOOSTER-Funktion und Einstellen der normalen Hörerlautstärke:

- Drücken Sie erneut auf  SOS. Die obere Mobilteil-Anzeige schaltet sich aus.

HINWEIS:

Die Audio-Boost-Funktion schaltet sich nach Beendigung des Anrufs automatisch aus. Um diese Funktion stets anzuschalten, bitte Kapitel 9.1.5 lesen

4.4 Anrufe beenden


Unter Verwendung des Mobilteils:

Drücken Sie während eines Anrufs auf  um den Anruf zu beenden. **ODER** legen Sie das kabellose Mobilteil auf die Ladestation, um den Anruf zu beenden.

4.5 Lautstärke des Hörers, bzw. des Lautsprechers einstellen

Sie können aus 6 Levels (LAUTSTÄRKE 1 bis LAUTSTÄRKE 6) auswählen



Unter Verwendung des Mobilteils: während eines Anrufs:

Drücken Sie auf  um eine Lautstärke zwischen 1-6 auszuwählen. Die derzeitige Einstellung wird angezeigt. Wenn Sie den Anruf beenden, bleibt die Einstellung auf dem zuletzt gewählten Level.

4.6 Anruf stumm schalten

Wenn der Anruf auf stumm geschaltet ist, können Sie sich mit jemandem in Ihrer Nähe unterhalten, ohne, dass der Anrufer Sie währenddessen hören kann.

Unter Verwendung des Mobilteils: während eines Anrufs:




Drücken Sie auf die **RECHTE TASTE** , um das Mikrofon stumm zu schalten und „MUTE ON“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr Anrufer kann Sie nicht mehr hören. Drücken Sie erneut auf die **RECHTE TASTE** , um das Mikrofon wieder einzuschalten.

4.7 Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen

Sie können bis zu 10 der zuletzt gewählten Nummern über Ihr Mobilteil zurückrufen. Wenn Sie einen Namen im Telefonbuch gespeichert haben, der mit der Nummer übereinstimmt, wird der Name stattdessen angezeigt. Die zuletzt gewählte Nummer wird ganz oben auf der Rückrufliste angezeigt.

4.7.1 Nummer von der Rückrufliste anrufen

Unter Verwendung des Mobilteils:





1. Im Ruhemodus, drücken Sie , um auf die Rückrufliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf , um durch die Rückrufliste zu scrollen.
3. Drücken Sie auf , um die gewünschte Rückrufnummer zu wählen.

HINWEIS:

Wenn sich keine Nummern auf der Rückrufliste befinden, wird „LEER“ auf der Bildschirmanzeige angezeigt.




4.7.2 Rückrufnummer im Telefonbuch speichern

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.7.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **AB HINZUF.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und überprüfen Sie die Telefonnummer.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um einen Namen einzugeben
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um den Eintrag zu speichern





4.7.3 Rückrufnummer löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.7.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und  um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um dies zu bestätigen.

4.7.4 Löschen der gesamten Rückrufliste





Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 in Abschnitt 4.7.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und  um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um dies zu bestätigen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um dies erneut zu bestätigen.

4.8 Das Mobilteil finden

Mit dieser Funktion können Sie verlorengegangene Mobilteile ausfindig machen. Sie können Mobilteile orten, indem Sie die Basisstation wie folgt bedienen.

- Im Ruhemodus, drücken Sie auf /HANDSETLOCATOR.

Alle Mobilteile, die mit der Basisstation verbunden sind, erzeugen daraufhin einen Piepton und „**SUCHLAUF**“ erscheint auf dem Bildschirm. Sie können den Vorgang beenden, indem Sie auf  / , oder die **RECHTE TASTE**  auf dem Mobilteil oder /HANDSET LOCATOR auf der Basisstation drücken .

HINWEIS:



Sollte während des Ortungsvorgangs ein Anruf eingeht, wird das Telefon klingeln, und der Ortungsvorgang wird unterbrochen.

4.9 Interne Anrufe tätigen

Diese Funktion erlaubt Ihnen, interne Anrufe zu tätigen, externe Anrufe weiterzuleiten und Telefonkonferenzen zu organisieren. Wenn das angerufene Mobilteil nicht innerhalb von 60 Sekunden antwortet, hört es auf zu klingeln und das angerufene Mobilteil geht zurück in den Standby-Modus.


4.9.1 Intercom

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Im Ruhemodus, drücken Sie die **RECHTE TASTE**  und die Nummern des angemeldeten Mobilteils wird angezeigt, außer der Nummer des anrufenden Mobilteils.
2. Wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus, mit der Sie sprechen möchten.
3. Das Mobilteil klingelt. Drücken Sie auf  auf dem angerufenen Mobilteil, um einen internen Anruf zustande zu bringen.

4.9.2 Alle Mobilteils anrufen







Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Im Ruhemodus, drücken Sie auf die **RECHTE TASTE**  und die Nummern aller registrierten Mobilteilen werden angezeigt, außer der Nummer des anrufenden Mobilteils.
2. Wählen Sie **ALLE** aus, um alle registrierten Mobilteile anzurufen.

4.9.3 Externe Anrufe weiterleiten

Unter Verwendung des Mobilteils:

Während eines externen Anrufs:


1. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und  um **INTERCOM** zu wählen.
2. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  um das Mobilteil zu wählen, mit dem Sie sprechen möchten.
3. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und der externe Anruf geht automatisch in die Warteschleife und das angerufene Mobilteil klingelt.
4. Drücken Sie auf  auf dem angerufenen Mobilteil, um einen internen Anruf einzurichten.
5. Drücken Sie auf  auf dem angerufenen Mobilteil oder legen Sie das anrufende Mobilteil auf die Ladestation, um den derzeitigen Anruf mit der externen Person zu beenden.
6. Der externe Anruf wird dann auf das angerufene Mobilteil übertragen.

4.9.4 Eine dreiseitige Telefonkonferenz einrichten

Die Telefonkonferenzfunktion ermöglicht das Teilen eines externen Anrufs mit zwei kabellosen Mobilteilen. Die drei Parteien können alle am selben Gespräch teilnehmen, ohne dass hierfür eine Netzwerkregistrierung notwendig ist.

Unter Verwendung des Mobilteils:

Während eines externen Anrufs:

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 4 in Abschnitt 4.9.3.
2. **Halten Sie**  auf dem anrufenden Mobilteil gedrückt, um eine Telefonkonferenz einzurichten.

HINWEIS:

Wenn eine Person während der Telefonkonferenz auflegt, bleiben die anderen Personen mit dem externen Anruf verbunden.








5 TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann bis zu 50 private Telefonbucheinträge im kabellosen Mobilteil und auf der Basisstation mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus bis zu 20 Zahlen für die Telefonnummer und bis zu 12 Zeichen für den Namen bestehen. Die Telefonbucheinträge werden in alphabetischer Reihenfolge der Namen gespeichert.

5.1 Einen neuen Telefonbucheintrag hinzufügen

Unter Verwendung des Mobilteils:


Im Ruhemodus:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um das **TEL.-BUCH** Hauptmenü zu wählen, und drücken Sie dann auf die **LINKE TASTE**  um **ALLE** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  um auf das Telefonbuch zuzugreifen.
3. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  um **HINZUF.** zu wählen.
4. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Namen ein.
6. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  um den Telefonbucheintrag zu speichern.

5.2 Nach einem Telefonbucheintrag suchen

Unter Verwendung des Mobilteils:




Im Ruhemodus:

1. Greifen Sie auf die Telefonbucheinträge zu, indem Sie auf die  **▼** Taste drücken.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein, indem Sie mehrere Male auf die Taste drücken.

5.3 Telefonbucheinträge einsehen

Unter Verwendung des Mobilteils:








Im Ruhemodus:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie  **▼**.
2. Drücken Sie **▲▼** um den gewünschten Telefonbucheintrag auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **ANSEHEN** auszuwählen. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um die Nummer für den ausgewählten Telefonbucheintrag einzusehen.

5.4 Telefonbucheinträge bearbeiten

Unter Verwendung des Mobilteils:





Im Ruhemodus:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie ▼. Drücken Sie ▲▼ um den gewünschten Telefonbucheintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um **ÄNDERN** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und die derzeitigen Inhalte des gewählten Telefonbucheintrags werden angezeigt.
4. Bearbeiten Sie die Nummer und drücken Sie die **LINKE TASTE** .
5. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie die **LINKE TASTE** .
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Einstellung zu bestätigen.
Hinweis: Verwenden Sie die **RECHTE TASTE**  um ein Zeichen oder eine Ziffer zu löschen.

5.5 Telefonbucheinträge löschen

Unter Verwendung des





Mobilteils: Im Ruhemodus:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie ▼. Drücken Sie ▲▼ um den gewünschten Telefonbucheintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um **LÖSCHEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur erneuten Bestätigung.

5.6 Löschung des gesamten persönlichen Telefonbuchs

Unter Verwendung des Mobilteils:






Im Ruhemodus:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie ▼.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ bis **ALLE LÖSCH**.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE** , um **ALLE LÖSCH** anzuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

5.7 Überprüfen der Nutzung des Telefonbuchs

Sie können überprüfen, wie viele Telefonbucheinträge in Ihrem Telefon genutzt werden, und wie viele Telefonbucheinträge noch zur Speicherung zur Verfügung stehen.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 5.1 oder drücken Sie ▼.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um die Option **STATUS** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE** , der Display zeigt „XX/50“ an (XX bezieht sich auf die Anzahl an Telefonbucheinträgen).
4. Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  oder  um die Anzeige zu verlassen.

5.8 Kurzwahlnummern einrichten

Nachdem die Kurzwahlnummern eingerichtet wurden, können Sie die vorgeschriebenen Nummern wählen, indem Sie die jeweiligen Zahlentasten im Ruhemodus gedrückt halten.

5.8.1 Kurzwahlnummern hinzufügen oder bearbeiten

Unter Verwendung des Mobilteils:




1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um **SCHNELLW.** auszuwählen
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um von **TASTE 1** bis **TASTE 9** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **HINZUF.**
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie die Nummer ein.
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Namen ein.
7. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zum Speichern

Oder, falls schon eine Nummer auf der Taste gespeichert wurde:

4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um **ÄNDERN** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ändern Sie die Nummer
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ändern Sie den Namen
7. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

5.8.2 Eine oder alle Kurzwahlnummern löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 gemäß Abschnitt 5.8.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ bis **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCH**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE** , um **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCH** anzuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

5.9 VIP Einstellungen

Nachdem Sie VIP Nummern gespeichert haben, können Sie sie einfacher in Ihrem VIP-Telefonbuch wiederfinden.

5.9.1 Einstellung von VIP-Nummern

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ALLE** Einträge auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um einen Kontakt auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **VIP HINZ.** auszuwählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zum Speichern.







5.9.2 VIP-Liste einsehen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **VIP** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um einen Kontakt auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ANSEHEN** auszuwählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Informationen einzusehen.

5.9.3 Eine oder alle VIP-Nummern löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** drücken, um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** drücken, um **VIP** auszuwählen.
3. Die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** drücken, um die Telefonnummer auszuwählen.
4. Die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** drücken, um **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCH.**
5. Die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung drücken
6. Die **LINKE TASTE**  zur erneuten Bestätigung drücken

5.9.4 VIP-Status

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das **TEL.-BUCH** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **VIP** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **STATUS** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung. Der Bildschirm zeigt „**XX/50**“ an (**XX** bezieht sich auf die Anzahl an VIP-Einträgen)
5. Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  oder  um das Menü zu verlassen.

6 ANRUFANZEIGE (NETZWERKABHÄNGIG)

Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sich für den Anruferkennungsdienst über Ihren Netzanbieter angemeldet haben. Ihr Telefon kann bis zu 20 empfangene Anrufe auf dem kabellosen Mobilteil mit Datum/Zeit und über eine Anruferliste speichern. Die Nummer wird auf der LCD-Anzeige angezeigt, wenn das Telefon klingelt. Wenn die Nummer mit den Einträgen in Ihrem persönlichen Telefonbuch übereinstimmt, wird der Name des Anrufers, welcher im privaten Telefonbuch hinterlegt ist, zusammen mit der Nummer angezeigt. Das Telefon klingelt dann mit der Melodie, die mit diesem Telefonbucheintrag verbunden ist.

Wenn die Nummer des Anrufers unterdrückt wird, dann wird diese als „**UNERREICHB.**“ angezeigt.



Handelt es sich um einen internationalen Anruf oder eine unbekannte Nummer, wird „**OUT OF AREA**“ angezeigt.

Wenn drei Anrufe unbeantwortet sind, wird „**3 NEUE ANRUF**“ angezeigt.





6.1 Anruferliste einsehen

Alle unbeantworteten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert, wobei der zuletzt empfangene Anrufer oben angezeigt wird. Wenn die Anruferliste voll ist, dann wird der am weitesten zurückliegende Anruf durch den neuesten Anruf ersetzt. Unbeantwortete Anrufe, die noch nicht eingesehen wurden, sind mit dem ★ Symbol markiert.

Unter Verwendung des Mobilteils:





1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um die **ANRUFLISTE** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um den gewünschten Eintrag einzusehen.

6.2 Weitere Informationen auf der Anruferliste

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um **INFOS** auszuwählen. Hier erhalten Sie den Namen und das Datum & die Uhrzeiten der verpassten Anrufe.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Telefonnummer zu sehen
4. Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  oder  um das Menü zu VERLASSEN.

6.3 Eine Nummer von der Anruferliste im Telefonbuch speichern





Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▲▼ um **TB HINZUF.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und die Nummer wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Namen ein.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

6.4 Eine Nummer von der Anruferliste zur schwarze Liste hinzufügen



Unter Verwendung des Mobilteils:

Wenn Sie eine Telefonnummer blockieren möchten, befolgen Sie die untenstehenden Schritte, um die Nummer zur schwarze Liste hinzuzufügen.

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um zur **SL HINZUF.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und die Nummer wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Namen ein.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung



6.5 Einträge in der Anruferliste löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

6.6 Löschen der gesamten Anruferliste







Verwendung des Mobilteils:

1. Befolgen Sie Abschnitt 6.1 um auf die Anruferliste zuzugreifen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **ALLE LÖSCH** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

7. SCHWARZE LISTE FUNKTION




Mit dieser Funktion können Sie Anrufe von den eingegebenen Nummern blockieren. Sie können bis zu 100 Kontakte einrichten und auswählen, ob Sie alle Anrufe, alle Anrufe mit Ausnahme der VIP-Kontaktliste, alle privaten oder unbekannt Nummern ablehnen möchten.

7.1 Speichern oder bearbeiten Sie eine gesperrte Nummer




1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **BLOCK ANR.** auszuwählen
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **SCHW LISTE** auszuwählen.
3. Wählen Sie mit der die **linken**  **Taste** und **▼ / ▲**, um die Funktion **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN** zu wählen
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und geben Sie die Nummer ein.
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und geben Sie den Namen ein.
6. Drücken Sie die **linke**  **Taste** zum Speichern.

7.2 Informationen von einer gesperrten Nummer ansehen

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Telefonnummer des gesperrten Kontakts anzuzeigen.





1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.1
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **ANSEHEN** auszuwählen
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Nummer und den Namen anzuzeigen.
4. Drücken Sie die **rechte**  **Taste**, um das Menü zu verlassen.

7.3 Eine oder alle gesperrte Nummern löschen

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.1
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▲▼**, um **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, **BESTÄTIG?** wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste**, um zu bestätigen.

7.4 Aktivierung der Funktion für gesperrte Nummern

Sie können alle eingehenden Anrufe blockieren, nur VIP-Kontakte zulassen oder die Funktion beenden.

1. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **BLOCK ANR.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **EINSTELLEN** auszuwählen
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **BLOCK MOD.**
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und die verschiedene Blockiermodi erscheinen: **AUS, ALLE BL., VIP ERL.**
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und die  Symbole wird angezeigt

7.5 Aktivierung der Funktion für private Nummern oder nicht verfügbar

Sie können eingehende Anrufe blockieren, die als PRIVAT oder NICHT VERFÜGBAR angezeigt sind.

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in Abschnitt 8.4
2. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um die Funktion **OHNE NR.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **PRIVAT** oder **UNERREICHBAR** werden angezeigt
4. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und **▼▲**, um **BLOCK.** Anzuwählen
5. Drücken Sie die **linke**  **Taste** und die  Symbole wird angezeigt

8. FOTOTASTEN

Auf diesem Modell unverfügbare Funktion

9. TELEFONEINSTELLUNGEN

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Einstellungen, die Sie ändern können, um Ihren persönlichen Anforderungen anzupassen.

9.1 Mobilteil-Einstellungen

9.1.1 Klingelmelodie für interne Anrufe einstellen

Sie können spezielle Melodien für interne Klingeltöne wählen. Insgesamt können Sie zwischen 10 Melodien auswählen.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **KL. EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **INT KLING** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Klingeltonmelodie für interne Anrufe auszuwählen.

HINWEIS:

Die jeweilige Klingeltonmelodie wird abgespielt, während Sie durch die Melodieliste scrollen.

5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.2 Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen

Sie können spezielle Melodien für externe Klingeltöne wählen. Insgesamt können Sie zwischen 10 Melodien auswählen.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **KL. EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **EXT KLING** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Klingeltonmelodie für externe Anrufe auszuwählen.

HINWEIS:

Die jeweilige Klingeltonmelodie wird abgespielt, während Sie durch die Melodieliste scrollen.


1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.3 Die Klingeltonlautstärke einstellen

Sie können die Klingeltonlautstärke einstellen. Insgesamt gibt es 6 Lautstärkestufen, unter anderem TON AUS, aus denen Sie auswählen können.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **KL. EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **KLGTON VOL** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Klingeltonlautstärke zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

HINWEIS:

- Die jeweilige Klingeltonlautstärke wird während der Auswahl demonstriert.
- Wenn AUS gewählt wird, wird  auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt.




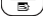
9.1.4 Warntöne einrichten

Wenn Sie eine Taste drücken, erklingt ein einzelner Ton. Sie können diesen Ton an oder ausschalten. Sie können außerdem Warntöne einrichten, wenn die Batterie niedrig ist, oder sich nicht außerhalb der Frequenzreichweite befinden. Ein Warnton für den niedrigen Akku ertönt dann während des Telefonats, um Sie darauf hinzuweisen, dass der Akku geladen werden muss.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **TON EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **TASTETON / AKKU TON / REICHW TON** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN** oder **AUS** zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.5 BOOST Tonverstärker Funktion aktivieren

Sie können die BOOST Tonverstärker Funktion dauerhaft aktivieren.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **MT EINST.** auszuwählen
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **AUTO BOOST** auszuwählen
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **AN** auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.6 Mobilteil-Sprache einrichten

Sie können bei der Sprache, die auf dem Mobilteil-Bildschirm angezeigt wird, aus 7 Sprachen auswählen (Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch).

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **SPRACHE** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die gewünschte Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.7 Einstellung der Uhrzeit




Sie müssen das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einstellen, damit die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und die Einträge in der Anruferliste mit dem richtigen Datum und der richtigen Zeit gespeichert werden.

Unter Verwendung des Mobilteils:





9.1.7.1 Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **MT EINST.** zu wählen
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **DATUM & ZEIT** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um **DATUMSFORM** anzuzeigen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das gewünschte Datumsformat auszuwählen (**TT--MM--JJ** oder **MM--TT--JJ**).
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.7.2 Zeitformat einstellen

1. Befolgen Sie die **Datum und Format einstellen** Schritte, um zum **DATUM & ZEIT** zu gelangen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **ZEITFORMAT** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um das gewünschte Uhrzeitenformat auszuwählen (**12 STD** oder **24 STD**).
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.1.7.3 Datum & Uhrzeit einstellen

1. Befolgen Sie die **Datum und Format einstellen** Schritte, um zum **DATUM & ZEIT** zu gelangen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **DATUM EINS.** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Tag ein. Das Datum sollte in dem Format sein, welches Sie per Abschnitt 9.1.7.1 gewählt haben.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie die Uhrzeit ein. Die Uhrzeit wird in dem Format sein, welches Sie per Abschnitt 9.1.7.2 gewählt haben.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.


HINWEIS:

Wenn die Uhrzeit bereits eingestellt wurde, wird die derzeitige Uhrzeit angezeigt, ansonsten wird „**HH-MM**“ angezeigt.




Wenn das Datum bereits eingestellt wurde, wird das derzeitige Datum angezeigt, ansonsten wird „**TT-MM-JJ**“ angezeigt.

9.1.8 Verbindung eines zusätzlichen Mobilteils

Hinweis: Das Mobilteil und die Basisstation sind bereits verbunden.
Bis zu fünf Mobilteile können mit einer Basisstation verbunden werden.

1. Auf der **Basisstation:** 5 Sekunden lang  **/HANDSET** halten, bis Sie einen Piepton hören und in den Verbindungsmodus gelangen.

Auf dem Mobilteil:




2. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE**  und verwenden Sie **▼▲** um **MT EINST.** auszuwählen.
3. Drücken Sie **DIE LINKE TASTE**  und verwenden Sie **▼▲** um **ANMELDEN** auszuwählen
4. Drücken Sie auf **DIE LINKE TASTE**  und die **ANMELDUNG** wird auf dem Display angezeigt.

Wenn die Verbindung gelungen ist, wird nach einer kurzen Pause ein Bestätigungston erklingen und das Mobilteil wird wieder in den Ruhemodus gehen. Die neue Mobilteil-Nummer wird angezeigt. Die Basisstation wird auch wieder in den Ruhemodus gehen.

9.1.9 Telefon zurücksetzen

Sie können Ihr Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Nachdem das Telefon zurückgesetzt wurde, werden alle persönlichen Einstellungen und Anruflisten gelöscht, aber die Telefonbucheinträge bleiben bestehen.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼▲** um **MT EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼▲** um **STD.EINST.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.2. Einstellung der Basisstation unter Verwendung des Mobilteils

9.2.1. Klingelmelodie einstellen

Sie können eine spezielle Melodie auswählen, um den externen Klingelton der Basisstation einzustellen. Insgesamt können Sie zwischen 5 Melodien auswählen.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um zu **BS EINST.** zu gelangen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BS KLING** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um den gewünschten Klingelton auszuwählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.2.2. Klingellautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Klingeltons für interne Anrufe (INT RING) und externe Anrufe (EXT RING) separat einstellen, mit Stufen zwischen 1 (am leisesten) und 5 (am lautesten), oder die LAUTSTÄRKE AUSSTELLEN.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼▲** um **BS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼▲** um **KLGTON VOL** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼▲** um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **DIE LINKE TASTE**  zur Bestätigung.


9.2.3. Flash-Time einstellen

Die Standard-Flash-Time richtet sich nach Ihrem Land und Ihrem Netzwerkbetreiber. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellung ändern müssen, es sei denn, es wird Ihnen geraten.

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BLINKZEIT** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um die gewünschte Flash-Time auszuwählen (**KURZ** 100ms, **MEDIUM** 300ms, **LANG** 600ms).
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

9.2.4. Den ersten Klingelton ausstellen

Sie können den ersten Klingelton ausstellen, um die Nicht-Benachrichtigung oder Benachrichtigung über Anrufe in der Leitung zu entfernen.








1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **BS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **1.KLINGEL** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **AN** oder **AUS**.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung

10. SOS NOTRUF

10.1. SOS Einstellungen

Sie müssen die SOS Nummern einrichten, bevor Sie SOS-Notrufe über Ihr Mobilteil tätigen können.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼▲**, um **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE** , um die **SOS NUMMER** anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼▲**, um die zu bearbeitende SOS Nummer auszuwählen (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** oder **SOS 4**).
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE** und wählen Sie **HINZUF.** oder **ÄNDERN** um die bereits gespeicherte Nummer zu ändern.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie die Telefonnummer ein.
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie den Namen ein.
7. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung oder die **RECHTE TASTE**  zum Löschen.




10.2. SOS Notrufe tätigen

Unter Verwendung des Mobilteils:

Halten Sie die **SOS Taste** auf dem Mobilteil gedrückt, um die Notrufanrufolge von der **SOS 1** Nummer bis zur **SOS 4** Nummer zu starten. Zuerst wird die **SOS 1** Nummer angerufen. Wenn die **SOS 1** Nummer nicht innerhalb von 60 Sekunden antwortet, wird ein Anruf an die **SOS 2** Nummer getätigt und so weiter.

Hinweis: Die Person, die die SOS-Nachricht empfängt, kann eine beliebige Zahl auf ihrem Telefon drücken, um den SOS-Anruf anzunehmen. Es soll alle 2 Minuten eine beliebige Zahl gedrückt werden, damit der Notruf bestehen bleibt, andernfalls hört das Telefon nach 10 Sekunden auf.

10.3. SOS-Sprache wählen

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼▲**, um **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼▲**, um **SOS SPR.** auszuwählen.
3. Wählen Sie eine der 4 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch oder Niederländisch) und drücken Sie die **LINKE TASTE**  zum Speichern .

10.4. SOS-Nachricht aufnehmen






Sie können eine persönliche SOS-Nachricht aufnehmen.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS NACHR.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **AUFNEHMEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE** um mit dem Aufnehmen zu beginnen.
Nun wird **“AUFNEHMEN...”** angezeigt.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um Ihre SOS-Nachricht zu speichern.




10.5. SOS-Nachricht abspielen

Unter Verwendung des Mobilteils:



1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS EINST.** zu wählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS NACHR.** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um **ABSPIELEN** anzuzeigen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die SOS-Nachricht abzuspielen.
5. Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  um das Abspielen der SOS-Nachricht zu beenden.

10.6. SOS-Nachricht löschen



Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS EINST.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **SOS NACHR** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲▼** um **LÖSCHEN** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE** zur Bestätigung, **ZURÜCKSETZEN** wird angezeigt.

11. WECKEREINSTELLUNGEN

Sie können dieses Telefon verwenden, um die Wecker Funktion zu nutzen. Wenn der Wecker eingestellt ist, wird  auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die Alarmzeit erreicht wird, leuchten  und „ALARM AN“ auf dem Bildschirm auf und die Alarmmelodie erklingt für 45 Sekunden. Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Alarm auszustellen.




HINWEIS:

- Die Alarmlautstärke ist dieselbe, wie die Einstellung der Klingeltonlautstärke für das Mobilteil. Wenn der Mobilteilklingelton auf **AUS** eingestellt ist, erklingt der Wecker auf dem **LAUTSTÄRKE 1** Level.
- Während eines Anrufs, wenn der Wecker gestellt ist, und die Weckzeit erreicht ist, blinken  und „ALARM AN“. Über den Hörer erklingt ein Ton, um den Nutzer wissen zu lassen, dass die Weckzeit erreicht ist. Der Nutzer kann eine beliebige Taste drücken oder  gedrückt halten, um den Wecker auszuschalten, danach kehrt der Bildschirm auf den Anrufbildschirm zurück.
- Während der Ortung oder, wenn das Mobilteil aus irgendwelchem Grund schon klingelt, erklingt der Wecker nicht.

11.1 Wecker aktivieren / deaktivieren

- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **WIEDERVORL** auszuwählen.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die **ALARMNUMMER** auszuwählen
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **AN/AUS**.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN** zu wählen.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie die Stunde und die Minuten ein.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie die Häufigkeit aus (**EINMAL, TÄGLICH, MO-FR, SA-SO**)
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und  wird angezeigt.

11.2 Alarm umbenennen

- Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 10.1.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **UMBENENNEN**.
- Drücken Sie die **RECHTE TASTE**  um Zeichen zu löschen und geben Sie einen neuen Namen ein
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.





11.3 Einstellung der Weckermelodie

- Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß 10.1.
- Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie eine **MELODIE**.

3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um die Melodie zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.




11.4 Sprachnachricht für den Wecker aufnehmen

Wenn Sie eine Sprachnachricht aufnehmen, wird Ihre Nachricht auf dem Mobilteil anstatt der Melodie abgespielt.

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß 11.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **SPRACHNR.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **AUFNEHMEN**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um den Aufnahmevorgang zu beenden.



11.5 Sprachnachricht für den Wecker abspielen

Wenn Sie eine Sprachnachricht aufgenommen haben, können Sie Ihre Nachricht abspielen

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 10.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **SPRACHNR.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **ABSPIELEN**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

11.6 Sprachnachrichten löschen

Wenn Sie eine Sprachnachricht aufgenommen haben, können Sie Ihre Nachricht auch wieder löschen.

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2 gemäß Abschnitt 10.1.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **SPRACHNR.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und wählen Sie **LÖSCHEN**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

12. SPRECH-FUNKTION

Ihr AMPLIDECT595 kann die Nummern, die Sie auf der numerischen Tastatur drücken laut aussprechen (Sprechtastatur).

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **SPRACHWAHL** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▲/▼** um **AN/AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13. ANRUFBEANTWORTER

Ihre Telefonbasisstation enthält einen Anrufbeantworter, der, falls eingeschaltet, unbeantwortete Anrufe aufnimmt. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten speichern und verfügt über eine maximale Aufnahmezeit von 30 Minuten. Er kann sowohl eingehende Anrufe als auch Memos für andere Nutzer des Telefons aufnehmen.

13.1 Anrufbeantworter an-/ausschalten

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **ANRUFB.** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **AB AN / AUS** zu wählen.
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **AN** oder **AUS** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.


HINWEIS:


Um den Anrufbeantworter schnell anzuschalten, drücken Sie auf die Taste **ANSWER ON** auf der Basisstation.

13.2 Nachrichten auf AB abspielen




Wenn Sie zum Beispiel 2 neue Nachrichten haben, wird auf der Anzeige 2 NEUE NACHRICHTEN angezeigt. Die neuen Nachrichten werden zuerst abgespielt, und werden dann als alte Nachrichten gespeichert, bis sie gelöscht werden. Alte Nachrichten werden erneut abgespielt, nachdem alle neuen Nachrichten abgespielt wurden.

Unter Verwendung der Basisstation:

Drücken Sie auf die Taste , um die neue Nachrichten abzuspielen.

Sie können das Abspielen der Nachrichten verlangsamen, indem Sie während des Abspielens auf die Taste  **SLOW** drücken.

Unter Verwendung des Mobilteils:

- 1) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um **ANRUFB.** auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um **ABSPIELEN** anzuzeigen.
- 3) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  noch einmal, um die Nachrichten abzuspielen, und der Bildschirm zeigt das Datum und die Uhrzeit an, als die Nachricht empfangen wurde.
- 4) Während des Abspielens der Nachrichten können Sie **▼/▲** drücken, um die Lautstärke anzupassen.

HINWEIS: Nachdem eine neue Nachricht abgespielt worden ist, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert, es sei denn, sie wird gelöscht.

- 5) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und **▼/▲** um die Funktionen **STOPP**, **VORWÄRTS**, **RÜCKWÄRTS** oder **LÖSCHEN** während des Abspielens von Nachrichten durchzuführen.

STOPP: Hält die derzeitige Nachricht an und kehrt zurück zum AB-Menü.

VORWÄRTS: Überspringt die Nachricht, um die nächste Nachricht abzuspielen. Das Datum und die Uhrzeit der nächsten Nachricht werden auf dem Bildschirm angezeigt, sollte es eine nächste Nachricht geben.

RÜCKWÄRTS: Spielt die derzeitige Nachricht noch einmal von vorn. Das Datum und die Uhrzeit der derzeitigen Nachricht werden angezeigt.

LÖSCHEN: Die derzeitige Nachricht wird gelöscht und die nächste Nachricht wird abgespielt.

6) Drücken Sie die **LINKE TASTE**  um die Einstellung zu bestätigen.





HINWEIS:

Alternativ können Sie die folgenden Shortcut-Tasten verwenden, um die verschiedenen Funktionen während des Abspielens der Nachrichten auszuüben.

- Drücken Sie auf **5** (■) um das Abspielen der Nachrichten zu beenden.
- Drücken Sie auf **4** (◀) um die derzeitige Nachricht noch einmal von vorn abzuspielen.
- Drücken Sie **zweimal die 4** um auf die vorige Nachricht zurückzuspringen.
- Drücken Sie auf die **6** (▶) um die nächste Nachricht abzuspielen.
- Drücken Sie die **2 (X)** um die derzeitig abspielende Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie auf ▼▲, um die Lautstärke zu kontrollieren.

13.3 Alle Nachrichten auf dem AB löschen

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▼/▲, bis zu **ANRUFB..**
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und ▼/▲, bis zu **ALT LÖSCH.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE** 
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  noch einmal, um zu bestätigen, dass alle alte Nachrichten gelöscht werden sollen.





HINWEIS:

Neue Nachrichten können nicht gelöscht werden, diese müssen erst abgespielt werden, bevor Sie diese löschen können.

13.4 Memos auf den AB speichern

Sie können Memo-Nachrichten für andere Nutzer aufnehmen. Wenn Sie ein Memo aufnehmen, wird die Anzahl der Nachrichten um eins steigen und Ihr Memo kann genauso abgespielt werden wie normale Nachrichten. Memos können sogar aufgenommen werden, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲**, bis **ANRUFB.**
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **MEMO.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE** , um das Memo nach dem Ton aufzunehmen, „**AUFNEHMEN**“ wird angezeigt.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE** , um die Aufnahme des Memos zu beenden und diese zu speichern.

ODER

Drücken Sie die **RECHTE TASTE** um die Aufnahme ohne Speichern zu beenden, und um zum AB-Menü zurückzukehren.

13.5 AB Einstellungen

13.5.1. Eine AB-Ansage aufnehmen

Sie können Ihre eigene AB-Ansage aufnehmen. Wenn Sie Ihre eigene AB-Ansage aufnehmen, wird diese benutzt, wenn der Anrufbeantworter einen Anruf entgegennimmt. Wenn Ihre persönliche AB-Nachricht gelöscht wird, dann wird automatisch wieder die Standardansage verwendet.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **ANRUFB.**
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **AB EINST.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **AB ANSAGE**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **AUFNEHMEN**
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE** , um Ihre persönliche AB-Ansage nach dem Ton aufzunehmen, „**AUFNEHMEN**“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE** , um die Aufnahme zu beenden und die persönliche AB-Ansage zu speichern. Ihre neu gespeicherte AB-Ansage wird dann automatisch abgespielt. Alternativ können Sie die **RECHTE TASTE** drücken, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die persönliche AB-Ansage zu speichern.

13.5.2 Abspielen der AB-Ansage

Unter Verwendung des Mobilteils:



1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **ANRUFB.**
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **AB EINST.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **AB ANSAGE.**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **ABSPIELEN.**
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  , um Ihre AB-Ansage abzuspielen: „**HOEREN ANSAGE**“ erscheint auf dem Bildschirm.
6. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  , um das Abspielen der AB-Ansage zu beenden und zum vorigen Menü zurückzukehren.

HINWEIS:

Wenn bis jetzt keine persönliche AB-Ansage aufgenommen wurde, wird die Standard-AB-Ansage abgespielt.

13.5.3 Persönliche AB-Ansage löschen (STANDARD AB-Ansage einrichten)

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 gemäß Abschnitt 13.5.2.
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **LÖSCHEN.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  , „**ZURÜCKSETZEN**“ wird angezeigt.

HINWEIS:

Ihre persönliche AB-Ansage wird gelöscht und Sie kehren zum vorigen Menü zurück, die Standard-AB-Ansage wird automatisch wiederhergestellt.




13.5.4 Anzahl der Ringe vor dem abholen festlegen

Sie können die Anzahl der Klingeltöne festlegen, bevor der Anrufbeantworter einspringt und bevor Ihre AB-Ansage abgespielt wird. Der Anrufbeantworter kann nach zwei bis zehn Klingeltönen einspringen. Sie können auch die TIME SAVER Funktion benutzen.

Die TIME SAVER Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Klingeltönen, bis eine neue Nachricht aufgenommen wird, dann springt der Anrufbeantworter nach ungefähr zwei Klingeltönen ein. Das ist sehr praktisch, wenn Sie den Fernzugriff nutzen; wenn Sie den Anrufbeantworter anrufen und nach viermal Klingeln noch keine Antwort erfolgt ist, dann bedeutet das, dass keine Nachrichten aufgenommen wurden und Sie auflegen können, bevor Ihnen der Anruf in Rechnung gestellt wird.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  , und dann **▼/▲** bis **ANRUFB.**
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **AB EINST.**

3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **ANTW VERZ.**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲**, um die gewünschte Beantwortungsverzögerung zu wählen.
(Mögliche Optionen: **2 Klingeltöne, 4 Klingeltöne, 6 Klingeltöne, 8 Klingeltöne, 10 Klingeltöne oder ECO MODUS**).
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.5 Aufnahmezeit der Nachrichten festlegen






Sie können die maximale Aufnahmezeit der Nachrichten festlegen.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **ANRUFB.**
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **AB EINST.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **AUFN.ZEIT**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲**, um die gewünschte Aufnahmezeit zu wählen. (Mögliche Optionen: **60S, 120S oder 180S**).
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.6 AB Sprache einstellen

Sie können bei der Sprache des Anrufbeantworters aus 4 Sprachen wählen (Englisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch).

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **ANRUFB.**
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **AB EINST.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **AB SPRACHE** zu wählen.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲**, um die gewünschte Sprache für den Anrufbeantworter und die SOS-Nachricht zu wählen.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.7 Filterung (mithören) an der Basisstation an-/ ausschalten

Sie haben die Möglichkeit, eingehende Nachrichten an der Basisstation mitzuhören oder geräuschlos aufzunehmen.

Verwendung des Mobilteils:






1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **ANRUFB.**
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **AB EINST.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **FILTERUNG.**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **AN oder AUS.**
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.8 Fernzugriff aktivieren

Sie können Ihre Nachrichten überprüfen und auch anderweitig auf den Anrufbeantworter zugreifen, indem Sie den AB anrufen, wenn Sie nicht zu Hause sind, und einen vierstelligen PIN über das Telefon eingeben. Verwenden Sie den vierstelligen Fernzugriff-PIN, um zu verhindern, dass Dritte unbefugt auf Ihren Anrufbeantworter zugreifen können.






13.5.8.1 Den vierstelligen Fernzugriff-PIN ändern

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann ▼/▲ bis **ANRUFB.**
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann ▼/▲ bis **AB EINST.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann ▼/▲ bis **PIN ÄNDERN.**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und geben Sie einen neuen vierstelligen PIN ein.
5. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung

13.5.8.2 Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren

Unter Verwendung des Mobilteils:

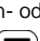1. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann ▼/▲ bis **ANRUFB.**
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann ▼/▲ bis **AB EINST.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann ▼/▲ bis **AB FERNST.**
Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann ▼/▲ um **AN** oder **AUS** zu wählen und den Fernzugriff entweder ein- oder auszuschalten.
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.8.3 Benachrichtigungsfunktion bei NACHRICHTEN

Diese Funktion sendet einen Piepton jede 10 Sekunden, sobald eine neue Nachricht empfangen wird. Um diese Funktion zu deaktivieren folgen Sie bitte die Prozedur.

Unter Verwendung des Mobilteils:

1. Drücken Sie auf die **LINKE TASTE**  und dann ▼/▲ bis **ANRUFB.**
2. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann ▼/▲ bis **AB EINST.**
3. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann ▼/▲ bis **NACHR.KL.**
4. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann ▼/▲ bis **AN** oder **AUS**, um die Benachrichtigungsfunktion ein- oder auszuschalten.
5. Drücken Sie die **LINKE TASTE**  zur Bestätigung.

13.5.8.4 Fernzugriff

Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter anrufen, um ihn ein- oder auszuschalten, und um Nachrichten abzuhören, indem Sie ein anderes Telefon benutzen.

1. Rufen Sie mit einem anderen Telefon an.
2. Sobald der Anrufbeantworter einspringt und die AB-Ansage abspielt, drücken Sie **X**.
3. Geben Sie den vierstelligen Fernzugriff-PIN ein (der Standard-PIN lautet 0000).
4. Drücken Sie die folgenden Tasten für die folgenden Optionen.

Taste	Funktionen	
	Während die Nachricht nicht abgespielt wird	Während die Nachricht abgespielt wird
2		Die derzeit abspielende Nachricht löschen.
4		Derzeit abspielende Nachricht von vorn wiederholen. Zweimal drücken um zur vorigen Nachricht zu springen.
5	Nachricht abspielen	Abspielen der Nachrichten beenden.
6		Zur nächsten Nachricht springen.
7	Anrufbeantworter einschalten.	
9	Anrufbeantworter ausschalten.	
X	Vierstelligen Fernzugriff-PIN eingeben	

HINWEIS:

- Wenn der AB-Speicher voll ist, ändert sich der Beantwortungsmodus von ANTWORTEN & AUFNEHMEN automatisch auf NUR BEANTWORTEN. Dieser ändert sich automatisch auf ANTWORTEN & AUFNEHMEN zurück, sobald einige Nachrichten gelöscht werden.

14. NEBENGERÄTE

Sie haben die Möglichkeit, maximal 4 Mobilteile, 3 DOORBELL und mehrere RINGER mit dem AMPLI DECT595 ULE zu verbinden. Wenn Sie einen Pack gekauft haben, sind sie schon mit dem Telefon verbunden. Sie brauchen nicht, das Anmelungsverfahren durchzuführen.


Wenn Sie ein zusätzliches DOORBELL oder RINGER verbinden müssen, benutzen Sie die mit dem Nebengerät übereinstimmte Anleitung.


14.1 . Einstellung der Nebengeräte

Drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann **▼/▲** bis **NEBENGERÄT**

Drücken Sie die **LINKE TASTE** , um **NEBENGERÄT** auszuwählen

• SIGNAL PRÜFEN

Für das **DOORBELL**: drücken Sie die **LINKE TASTE**  und dann auf den Klingelknopf , um die Signalstärke zu prüfen.

Für den **RINGER**: drücken Sie **LINKE TASTE** , um die Signalstärke zu prüfen.

• DOORBELL

- **KLG EINST.:** erlaubt Ihnen, die Lautstärkestufe sowie die Melodie des DOORBELLS einzustellen
- **AUFNEHMEN?** erlaubt Ihnen, die Aufnahme der Kommunikation mit dem DOORBELL zu aktivieren, bzw. deaktivieren.
- **DBELL DVRT:** diese Funktion erlaubt Ihnen, einen Anruf von der Gegensprechanlage nach einer externen Nummer weiterzuleiten. Das DOORBELL ruft direkt die externe Nummer an, wenn man klingelt.
- **DVRT MODU** erlaubt Ihnen, die automatische Weiterleitung zu aktivieren, bzw. deaktivieren.
- **NUM PREREG** erlaubt die Nummer zur Weiterleitung vorher zu registrieren.

14.2 Info Nebengerät

In diesem Menü, können Sie prüfen:

STATUS: erlaubt Ihnen zu prüfen, ob das System aktiviert, bzw. deaktiviert ist.

LISTE: erlaubt zu prüfen, wann das System ausgelöst worden ist.

UMBENENNEN: erlaubt, das System umzubenennen.

15.FEHLERSUCHE

Sollten bei Ihrem Telefon Probleme auftreten, probieren Sie bitte die folgenden Hilfestellungen aus.

Problem	Lösungen
Mein Telefon funktioniert überhaupt nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt und vollständig geladen ist.• Um eine optimale Leistung zu garantieren, legen Sie das Mobilteil nach der Verwendung auf die Basisstation.• Stellen Sie sicher, dass das Netzteil fest in der Steckdose sitzt und kein Wandschalter umgeschaltet werden muss.• Stellen Sie sicher, dass die Telefonleitung fest in der Basisstation und im Wandanschluss sitzt.• Ziehen Sie das elektrische Kabel aus der Basisstation. Warten Sie ungefähr 15 Sekunden und stecken Sie es dann wieder herein. Warten Sie eine Minute, bis sich das Mobilteil und die Basisstation synchronisiert haben.• Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Sollte das immer noch nicht funktionieren, müssen Sie eventuell einen neuen Akku kaufen.• Trennen Sie die Verbindung zwischen Basisstation und dem Wandtelefonanschluss und schließen Sie ein funktionierendes Telefon an. Sollte dieses auch nicht funktionieren, liegt es eventuell am Kabel oder am Telefon-Service. Setzen Sie sich mit Ihrem Netzwerkbetreiber in Verbindung.
Auf dem Bildschirm wird ein niedriger Akku angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">• Legen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Basisstation.• Entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein, nutzen Sie ihn vollständig und laden Sie dann das Mobilteil auf der Basisstation auf.• Bei weiteren Problemen muss der Akku eventuell ausgetauscht werden.
Die Mobilteil-Batterie lädt nicht auf oder akzeptiert den Ladevorgang nicht	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil richtig auf der Basisstation aufliegt.• Entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein und laden ihn dann 16 Stunden auf.• Kaufen Sie einen neuen Akku.

Während Telefonunterhaltungen kommt es zu Störungen. Meine Anrufe werden ausgeblendet , wenn ich das Mobilteil benutze.

- Eventuell befindet sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran.
- Wenn Sie High-Speed-Internet (Digital Subscriber Line – DSL) über Ihre Telefonleitung nutzen, müssen Sie einen DSL-Filter zwischen der Basisstation und dem Wandanschluss anbringen. Der Filter verhindert Störungen und Caller-ID-Probleme, die durch DSL-Störungen verursacht werden können. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem DSL-Betreiber in Verbindung, um mehr über DSL-Filter zu erfahren.
- Geräte und andere Kabellose Telefone, die an denselben Stromkreis wie die Basisstation angeschlossen sind können Störungen verursachen.
- Versuchen Sie, die Geräte oder die Basisstation an einen anderen Stecker anzuschließen.
- Andere elektronische Produkte können zu Störungen bei Ihrem kabellosen Telefon führen. Schließen Sie Ihr Telefon so weit weg wie möglich von den folgenden elektronischen Geräten an: kabellose Router, Radios, Funktürme, Handys, digitale Telefone, Gegensprechanlage, Zimmer-Monitore, Fernseher, VCRs, persönliche Computer, Küchengeräte und andere kabellose Telefone.
- Wenn Ihr Telefon zusammen mit einem Modem oder Überspannungsschutz angeschlossen ist, schließen Sie das Telefon (oder das Modem/ den Überspannungsschutz) an einem anderen Ort an. Sollte das Problem weiter bestehen, stellen Sie Ihr Telefon oder Modem weit voneinander entfernt auf, oder benutzen Sie einen anderen Überspannungsschutz.
- Der Standort Ihrer Basisstation kann die Leistung Ihres kabellosen Telefons beeinträchtigen. Stellen Sie die Basisstation für besseren Empfang zentral im Haus oder Büro und weg von Wänden oder anderen Hindernissen auf. Oft kann die Leistung gesteigert werden, wenn die Basisstation höhergestellt wird.
- Unterbrechen Sie die Verbindung zwischen Basisstation und Telefonwandanschluss und schließen Sie ein verkabeltes Telefon an. Wenn die Anrufe immer noch nicht deutlich sind, liegt es wahrscheinlich an der Verkabelung oder dem Telefon-Service.
- Kontaktieren Sie Ihren Telefonbetreiber (hier können Kosten entstehen).
- Wenn Sie auch bei anderen Telefonen im Haus Probleme haben, liegt es wahrscheinlich an der Verkabelung oder dem Telefon-Service.

**Häufige
Lösungen für
elektronische
Geräte.**



Sollte das Telefon nicht normal funktionieren, legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Wenn es nicht reagiert, versuchen Sie folgendes (in der jeweiligen Reihenfolge):

- Ziehen Sie den Stecker der Basisstation.
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Mobilteil.
 - Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Basisstation wieder anschließen.
 - Setzen Sie die Batterien wieder ein und legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.
 - Warten Sie, bis sich das Mobilteil mit der Basisstation synchronisiert hat. Das kann bis zu einer Minute dauern.
-

Dieses Telefon verfügt nicht über eine Erdungsfunktion! Daher können einige Funktionen bei PBX-Systemen eingeschränkt sein.

Bitte kontaktieren Sie die technische Hotline Ihres Netzbetreibers, um weitere Informationen zu erhalten.

16. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hauptdaten	
Reichweite	Drinnen: 50m Draußen: 300m
Mobilteil Betriebszeit	Standby-Zeit: ca. 100Stunden Sprechzeit: ca. 10 Stunden
RF Parameter	
Frequenz	1.88GHz bis 1.9GHz
Anzahl an Kanälen	10
Strahlungsleistung	<250 mW
Stromversorgung	
Basisstation	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.6A, 3.6W Adapter
Ladegerät	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.45A, 2.7W Adapter
Mobilteil	3 Batterien AAA 1.2V/600mAh NiMh wiederaufladbar

Klingelton-Level	
Basisstation	80 dB bei 1 Meter
Mobilteil	80 dB bei 1 Meter

Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.
Dieses Produkt ist in China für Geemarc Telecom hergestellt

17. ANLEITUNGEN ZUR PFLEGE UND WARTUNG

Pflegen Sie Ihr Telefon

- Ihr kabelloses Telefon enthält hochentwickelte elektronische Teile. Behandeln Sie es mit Sorgfalt.
- Gerät nicht grob behandeln.
- Legen Sie den Handapparat sanft ab.
- Bewahren Sie die ursprünglichen Verpackungsmaterialien auf, um Ihr Telefon geschützt zu verpacken, falls Sie es irgendwann versenden müssen.

Berührung mit Wasser vermeiden

- Ihr Telefon könnte beschädigt werden, wenn es nass wird. Verwenden Sie den Handapparat nicht im Regen oder mit nassen Händen. Platzieren Sie die Telefonbasis nicht in die Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder Dusche.

Gewitter

- Gewitter können manchmal Spannungsspitzen verursachen, die elektronische Geräte beschädigen können. Üben Sie zu Ihrer Sicherheit Vorsicht bei der Verwendung elektrischer Geräte während eines Gewitters.

Reinigung Ihres Telefons

- Ihr Telefongerät verfügt über ein robustes Kunststoffgehäuse, das seinen Glanz über viele Jahre hinweg bewahren sollte. Nur mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtetem Tuch reinigen.
- Verwenden Sie kein überschüssiges Wasser oder Lösungsmittel jeglicher Art zur Reinigung.

HINWEIS

Denken Sie daran, dass Elektrogeräte schwere Verletzung verursachen können, wenn Sie nass sind oder in Wasser stehen. Sollte die Telefonbasis in Wasser fallen, **HOLEN SIE SIE NICHT HERAUS, BEVOR SIE DAS STROMKABEL AUS DER STECKDOSE UND DAS TELEFONKABEL AUS DER WAND ABGEZOGEN HABEN.** Ziehen Sie das Gerät anschließend an den abgezogenen Kabeln aus dem Wasser.

VORSICHT

EXPLOSIONSGEFAHR, FALLS DAS AKKU DURCH EINEN FALSCHEN BATTERIETYP ERSETZT WIRD.

GEBRAUCHTES AKKUPACK DEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND ENTSORGEN.

18 GARANTIE

Geemarc™ (AD595 ULE) bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.
WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie:

Die Garantie ist nur in Deutschland gültig.

19. ERKLÄRUNGEN:

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden.

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln. Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.

Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter

www.geemarc.com/de



2 rue Galilée, 59760 GRANDE-SYNTHE, FRANCE

E-mail: kundendienst@geemarc.com Telefon: +49(0)30 209 95 789

Von Geemarc Telecom im China hergestellt



UG DECT595 ULE Ge V1.4



Telecom FRANCE
2 rue Galilée-
Parc de l'étoile
59760 GRANDE-SYNTHE
France

E-Mail: kundendienst@geemarc.com

Telefoon: :+49(0)30 209 95 789