


Wie benutzt man:


EarTech TV-Audio-Nackenbandempfänger

ACHTUNG: Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder den Hersteller des Schrittmacher, bevor Sie das Halsband verwenden, um sicherzustellen, dass der Schrittmacher nicht Störungen unterliegen.

1. Schalten Sie Ihre Tonquelle (zB Fernseher) ein und stellen Sie Ihre Hörgeräte auf die T-Spule-Einstellung.
2. Stellen Sie die Lautstärke am Nackengurt zunächst auf eine niedrige Lautstärke ein, um Ihr Hören.
3. Das Schloss des Nackengurts dient zum sicheren Tragen des Geräts und ist so konzipiert, dass es Unfälle minimieren. Stellen Sie sicher, dass das Schloss des Nackengurts vollständig geschlossen ist (siehe S. 6)
4. Schalten Sie den Nackengurt-Empfänger mit dem ON / OFF-Schalter an der Seite des Empfängers ein. Die blinkende grüne LED am Empfänger zeigt an, dass der Empfänger eingeschaltet ist. Die LED leuchtet durchgehend grün, sobald ein Signal von der Tonquelle empfangen wird. Wenn das Grün Die LED blinkt nach einer Minute weiter, siehe S. 11 für Pairing-Anweisungen.
5. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke an Ihrem Nackengurtempfänger ein.
6. Wir empfehlen, das Halsband auszuschalten und wieder in den Sender zu legen. Ladestation bei Nichtgebrauch, um sicherzustellen, dass der Akku immer aufgeladen ist.

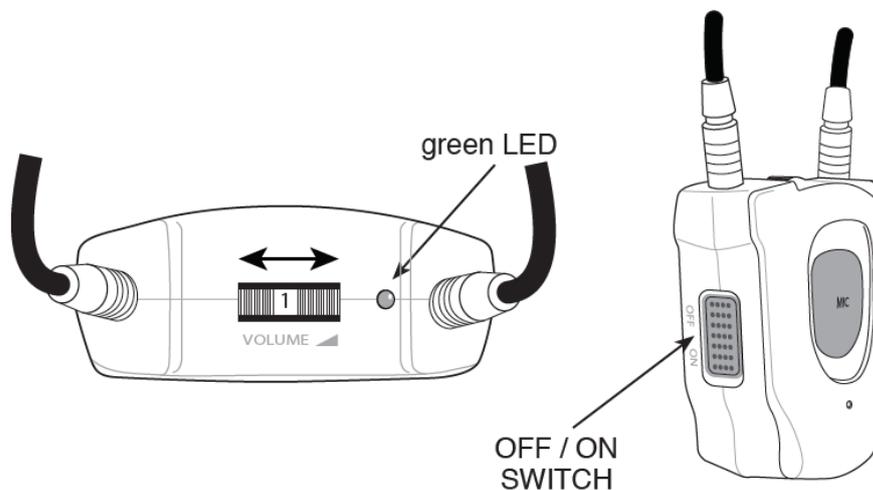


Sicherheitsverschluss im Nackengurt

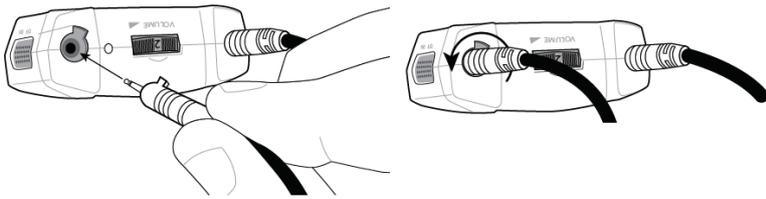

Bitte stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsschloss im Nackengurt vollständig geschlossen ist, um einen sicheren Funktion.


Hören mit Hörgeräten mit T-Spule

Hören mit 3,5-mm-Stereo-Ausgang (Neckloop)

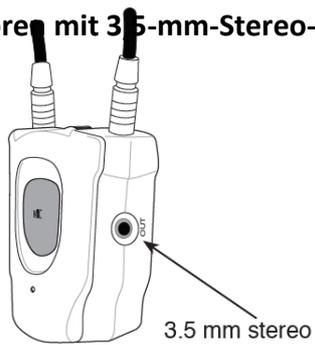

Kopfhörer oder Ohrhörer

(Neckloop)

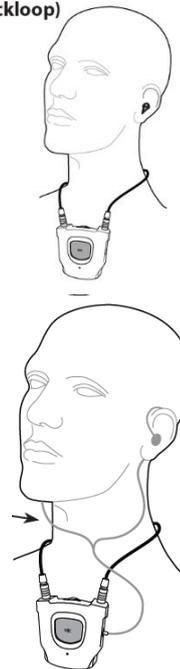

Wichtig!

Die Gesamtbetriebszeit des Receivers kann je nach Hörlautstärke und am Ausgang angeschlossenem Zubehör deutlich reduziert werden.